

DE

Gebrauchsanweisung

Zahnmedizinischer Dentalfotospiegel
CLEAR CAPTURE



Download unter www.shop-smileline.de

Gebrauchsanweisung

zahnmedizinischen Dentralfotospiegel
CLEAR CAPTURE



Produkt:

CLEAR CAPTURE Dentralfotospiegel

Name: CLEAR CAPTURE

Handelsmarke: CLEAR CAPTURE

Produktidentifikationsnummer: CC-PSP-002

Basic UDI: PP 13895 111964099560 77

Herstellerangaben:

Name: Smile Line Europe GmbH

Anschrift: Kirschanger 4, 14548 Schwielowsee OT Caputh

Kontaktperson: CEO Frau Yunexys Reinicke

SRN: DE-MF-000045361

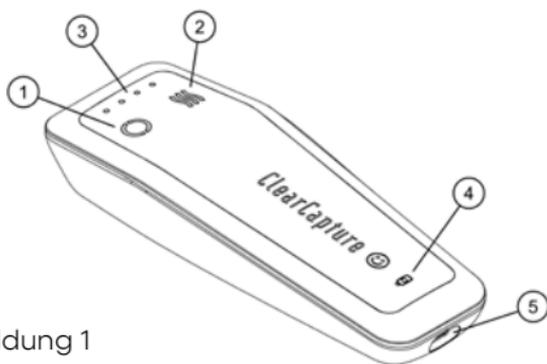


Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

1. Beschreibung/ Zweckbestimmung

Clear Capture ist ein innovativer, elektronischer Dental-Fotospiegel, der speziell für hochwertige intraorale Aufnahmen entwickelt wurde. Dieses Produkt hebt die Qualität der Bildaufnahmen in der Mundhöhle auf ein neues Niveau und ermöglicht es Zahnärzten, insbesondere Kieferorthopäden, qualitativ hochwertige, beschlagfreie Bilder des Mundinneren zu erstellen.

Das Gerät nutzt eine einzigartige elektronische Technologie zur Regulierung von Luft und Licht in vier Stufen. Diese Funktionen gewährleisten, dass die Bilder stets klar und frei von Beschlag sind, selbst während der Patientenatmung.

1.1. Hauptmerkmale:

- Einstellbare Lichtintensität: Optimale Beleuchtung für präzise Aufnahmen.
- Regulierbarer Luftstrom: Verhindert das Beschlagen des Spiegels während der Behandlung.
- Benutzerfreundliches Design: Ergonomische Handhabung für komfortable Anwendungen.
- Hohe Bildqualität: Detaillierte intraorale Ansichten für exakte Diagnosen und Dokumentationen.

Der Clear Capture Dental-Fotospiegel ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für moderne zahnmedizinische Praxen, das eine effektive Dokumentation und Behandlungsergebnisse fördert.

1.2. Vorteile

Kein Beschlagen während der Aufnahmen:

- Der Patient kann während der Aufnahmen atmen, was die Aufnahmequalität verbessert.

Gleichmäßige Beleuchtung des Mundraums:

- Die Bilder sind klar und deutlich, was die Diagnosemöglichkeiten des Behandlers erheblich verbessert.

Keine Notwendigkeit zum Vorheizen:

- Eine regelmäßige Belüftung wird durch den eingebauten Ventilator gewährleistet, sodass ein Vorheizen der Spiegel nicht erforderlich ist.

Effiziente Nutzung der Zeit:

- Das Fotografieren wird effizienter, da der Spiegel nicht unter warmem Wasser oder vorgeheizt werden muss.

Einfach zu handhaben:

- Der Patient kann das Gerät selbst halten, was die Interaktion und den Komfort während der Behandlung verbessert.

Ergonomisches Design:

- Die Form der einzelnen Spiegel (bukkal und okklusale) ist perfekt angepasst und sorgt durch die Rundung für eine optimale Anpassung an den Mund des Patienten.

2. Indikationen

2.1. Zahnmedizinische Behandlungen:

- Verbesserung der Sicht auf schwer zugängliche Bereiche im Mund.
- Verwendung während Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen und anderen zahnärztlichen Eingriffen.
- Dokumentation des Behandlungsfortschritts und der Ergebnisse.

2.2. Kieferorthopädische Behandlungen:

- Unterstützung bei der Beurteilung des Zahnstands und der Wirkung kieferorthopädischer Geräte.
- Visuelle Kontrolle während der Anpassung von Zahnspangen.

2.3. Ästhetische Zahnmedizin:

- Dokumentation von kosmetischen Eingriffen (z. B. Veneers, Bleaching).
- Verbesserung der Sichtbarkeit für präzise Farb- und Formanpassungen.

3. Kontraindikationen

3.1. Schwere Mundinfektionen:

Verwendung des Geräts bei aktiven, schweren Infektionen im Mundbereich kann das Risiko einer weiteren Verbreitung erhöhen. Nach der Nutzung sofort das Gerät desinfizieren und die Aufsätze sofort sterilisieren. Siehe Sterilisationsvorgang.

3.2. Nicht kooperative Patienten:

Bei Patienten, die nicht stillhalten können oder starke Angst empfinden, könnte die Anwendung gefährlich oder ineffektiv sein. Empfehlen der Patienten aktiv ansprechen und gegeben falls der Patient das Gerät selbst festhalten zu lassen.

3.3. Bestimmte Erkrankungen:

Patienten mit schwerer Atemnot oder spezifischen Atemwegserkrankungen könnten Schwierigkeiten mit der Luftregulierung haben. Wir empfehlen hier eine niedrige Luftstufe zu nutzen.

3.4. Unzureichende Mundhygiene:

Bei Patienten mit extremer Zahnbelastung oder schlechtem Mundzustand, ist die Behandlung möglicherw. nicht geeignet.

4. Lieferumfang und Produktbestandteile

Überprüfen Sie zunächst den Inhalt der Packung:

- 1x Clear Capture Gerät
- 1x USB-C Ladekabel/ Netzteil für Clear (Art. - CC-USB)
- 1x CC-Spiegel Okklusal Standard (Art. - CCS-OKSD002)

- 1x CC-Spiegel Okklusal Groß (Art. - CCS-OKG003)
- 1x CC-Spiegel Okklusal Klein (Art. – CCS-OKK001)
zzgl. zu kaufen
- 1x CC-Spiegel Bukkal Lang (Art. - CCS-BL004)
- 1x CC-Spiegel Bukkal Kurz (Art. - CCS-BK005)
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Fasertuch

5. Sicherheitshinweise

Nur von geschultem Personal verwenden.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten in Verbindung mit dem elektronischen Gerät.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung ordnungsgemäß gewartet ist

6. Montage der jeweiligen Spiegel in das Clear Capture Gerät

Wir empfehlen, den Spiegel in die vorgesehene Öffnung (siehe Abbildung 1 / Nr. 7) einzusetzen, bevor Sie das Gerät einschalten.

6.1. Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass das Clear Capture Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.

6.2. Auswahl des Spiegels:

Wählen Sie den entsprechenden Spiegel aus (bukkal oder okklusal), je nach benötigter Anwendung.

6.3. Einsetzen des Spiegels:

Führen Sie den Spiegel vorsichtig in die vorgesehene Öffnung

des Clear Capture Geräts ein. Achten Sie dar auf, dass der Spiegel richtig ausgerichtet ist, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, die Form des Spiegels zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er korrekt eingelegt wird.

6.4. Gerät einschalten:

Nachdem der Spiegel sicher eingesetzt ist, können Sie das Gerät einschalten und mit den Aufnahmen beginnen.

6.5. Überprüfung:

Stellen Sie sicher, dass der Spiegel fest sitzt und keine Bewegung aufweist, bevor Sie mit der Nutzung fortfahren.

Hinweis: Wir empfehlen, den Spiegel vor dem Einschalten des Geräts einzusetzen.

7. Beschreibung der Bedienungsschritte

7.1. Vor dem Gebrauch:

Überprüfen Sie das Gerät umgehend auf seine Funktionsfähigkeit.


7.2. Einfache Bedienung:

Das Gerät lässt sich durch die ergonomische und moderne Ausstattung sehr einfach und schnell bedienen.

7.3. On-/Off-Funktion

Ein- oder Ausschalten:

- Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang auf die linke oder rechte Funktionstaste (Licht/Luft).
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie mit der Regulierung der einzelnen Funktionen beginnen, indem Sie kurz auf die jeweiligen Knöpfe drücken.

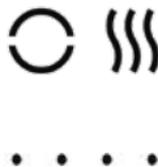

7.4. Symbole und ihre Funktionen

Lichtpunkte:

Das Gerät ist mit 4 Lichtpunkten ausgestattet, die zur Erkennung der Licht- oder Belüftungsstufen dienen.

Belüftungssymbol:

Durch drücken dieses Symbols wird ihnen die aktuelle Belüftungsstufe angezeigt.



Lichtungssymbol:

Durch drücken dieses Symbols wird ihnen die aktuelle Lichtstufe angezeigt.



Batteriesymbol:

Das Batteriesymbol informiert über den aktuellen Ladezustand des Geräts.



Anpassung der Stufen:

In jeder Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen in 4 verschiedenen Stufen mit nur einem Klick zu erhöhen oder zu reduzieren.

7.5. Aufladen des Geräts

Ladevorgang:

- Netzanschluss
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-C Ladekabel an das Gerät und an eine geeignete Stromquelle an.
- Achten Sie darauf, dass das Batteriesymbol während des Ladevorgangs leuchtet, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.
- Trennen Sie das Ladekabel, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

7.6. Überprüfung der Funktionalität:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

- Führen Sie einen kurzen Testlauf durch, um die Funktion von Licht und Luft zu überprüfen.

8. Verwendung

8.1. Einrichtung

Platzieren Sie den Dentalfotospiegel im Mund des Patienten, um den gewünschten Bereich gut sichtbar zu machen. (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3)

Verwenden Sie die Halterung, um den Spiegel stabil zu halten.

8.2. Lichtregulierung:

Beim Anschalten des Geräts werden die Licht- und Luftfunktion automatisch gestartet. Passen Sie die Lichtintensität durch drücken des Lichtsymbols individuell an, bis die optimale Ausleuchtung erreicht ist.



8.3. Luftregulierung:

Beim Anschalten des Geräts werden die Licht- und Luftfunktion automatisch gestartet. Passen Sie die Belüftungsintensität durch drücken des Belüftungssymbols individuell an, bis der optimale Luftstrom erreicht ist.



Nach der Verwendung

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Entfernen Sie der Spiegelaufsatz aus dem Gerät
- Reinigen Sie den Spiegel und das elektronische Gerät gemäß den Hygienestandards. Siehe Sterilisation und Hygieneabläufe
- Lagern Sie das Gerät an einem sicheren Ort.

9. Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Geräts. Tauschen Sie bei Bedarf defekte Teile aus. Führen Sie keine Reparatur selbst durch. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Prüfen Sie bei jeder Anwendung die Aufsätze nach Fehler.

10. Technische Unterstützung

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter **service@smileline-europe.com**

10.1. Komponenten

Dentalfotospiegel:

- Hochwertiges, beidseitige polierte Edelstahl Spiegel
- Ergonomisches Design für eine einfache Handhabung.

Lichtquelle:

- Das Gerät ist ausgestattet mit 4 LEDs
- Einstellbare Helligkeit

Luftregulierung:

- Einstellbarer Luftstrom durch ein Ventil

Steuergerät:

- Steuerung der Licht- und Luftfunktionen durch Tastenfeld
- LED-Anzeigen für den Betriebsstatus.

11. Sterilisations- und Desinfektionsprozess Vorbereitungsphase nach MDR

11.1. Reinigung:

- Entfernen von groben Verunreinigungen durch Abwischen mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden eines enzymatischen Reinigungsmittels zur gründlichen Reinigung der Oberfläche.
- Entfernen Sie der Aufsatz (Spiegel) von der elektronische Gerät Clear Capture.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit der gebrauchsfertige Desinfektionstücher mit oder ohne Alkohol.
- Verwenden Keine Flüssigkeiten oder flüssigen Reinigungsmittels, um das Gerät zu reinigen.
- Das Gerät ist nicht autoklavierbar / Sterilisation nicht notwendig.
- **ACHTUNG** das Clear Capture ist ein elektronisches Gerät und darf nicht autoklaviert werden.
- Achten Sie darauf, alle Bereiche des Geräts, die in der Nähe der Mundhöhle in Kontakt kommen, besonders gründlich zu desinfizieren.

11.2. Sterilisation

- Die Spiegel müssen bei 134°C /273°F für 15-20 Minuten mit Wasserdampf sterilisiert werden.
- Länderspezifische Regelungen sind anzuwenden.
- Gemäß den vom Autoklaven-Hersteller angegebenen Sterilisationszyklen sterilisieren.
- Das Sterilisieren mit der Trockenhitzemethode (Heißluft-Sterilisator) ist nicht zu empfehlen, da dies den Verschleiß der Oberfläche der Spiegel beschleunigen und beschädigen kann.
- Überprüfen Sie nach der Sterilisation, ob die Spiegel in einwandfreiem Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen.



12. Vorgesehene Anwender

12.1. Zahnärzte, Kieferorthopäden, Zahnmedizinisches Fachpersonal

Zahnärzte, die den Fotospiegel zum Zwecke der Dokumentation verwenden. Fachzahnärzte, die den Spiegel zur Beurteilung und Dokumentation der kieferorthopädischen Behandlungen nutzen. Zahnarzhelferinnen und -helfer, die bei der Behandlung und Dokumentation von Patientenassistenz leisten.

12.2. Zahnärztliche Auszubildende

Studenten in der zahnmedizinischen Ausbildung, die lernen, wie man den Spiegel effektiv in der Praxis anwendet.

13. Garantie

13.1. Garantiezeitraum

- Der Dentalfotospiegel wird mit einer Garantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum geliefert.

13.2. Garantieumfang

- Die Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die während des normalen Gebrauchs auftreten.
- Die Garantie gilt für alle elektronischen Komponenten, einschließlich des Licht- und Luftregulierungssystems.

13.3. Ausschlüsse

- Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Missbrauch, unbefugte Reparaturen oder Veränderungen entstehen.
- Schäden, die durch nicht autorisierte Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel verursacht werden.
- Abnutzung durch normalen Gebrauch, wie Kratzer oder Verfärbungen.

13.4. Garantieansprüche

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, benötigen Sie:

- Den Kaufbeleg vorlegen.
- Das Gerät zur Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur an den Hersteller oder autorisierte Servicepartner senden.

13.5. Reparatur oder Austausch:

Bei berechtigten Garantieansprüchen wird das defekte Gerät repariert oder, falls dies nicht möglich ist, durch ein gleichwertiges Gerät ersetzt.

14. Sicherheit bei Defekt

14.1. Sofortige Nutzung einstellen:

Bei Anzeichen eines Defekts (z.B. Funktionsstörungen, übermäßige Hitze, ungewöhnliche Geräusche) sollte das Gerät sofort außer Betrieb genommen werden. Sofort das Gerät ausschalten und der Servicedienst kontaktieren.

14.2. Risiko von Verletzungen:

Ein defektes Gerät kann zu Verletzungen des Patienten oder des Anwenders führen. Bei elektrischen Problemen besteht die Gefahr von Stromschlägen. Sofort das Gerät ausschalten.

14.3. Verunreinigungen:

Defekte Geräte könnten die Hygiene gefährden. Beschädigte Oberflächen sind schwieriger zu reinigen und zu desinfizieren. Bei Beschädigung sofort austauschen.

14.4. Dokumentation von Defekten:

Alle Defekte sollten dokumentiert werden, um Muster zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Informieren Sie den Hersteller.

14.5. Professionelle Überprüfung:

Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker überprüfen und reparieren, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

15. Warnhinweise

15.1. Nur für den vorgesehenen Gebrauch:

Dieses Gerät ist ausschließlich für zahnmedizinische Anwendungen bestimmt. Jede andere Nutzung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

15.2. Stromversorgung:

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem angegebenen Netzteil. Überlastung oder falsche Spannung können zu elektrischen Schlägen oder Geräteschäden führen.

15.3. Wasser- und Feuchtigkeitsschutz:

Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Nasse Bedingungen können zu elektrischen Kurzschlüssen führen.

16. Temperatur- und Umgebungseinflüsse

Lagern und verwenden Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen. Dies kann die Funktion beeinträchtigen.

16.1. Regelmäßige Wartung:

Lassen Sie das Gerät regelmäßig von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen. Eine mangelnde Wartung kann die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.

16.2. Reinigungshinweise:

Verwenden Sie nur zugelassene Desinfektionsmittel und Rei-

nigungstechniken. Ungeeignete Produkte können Materialien beschädigen oder die Hygiene gefährden.

16.3. Sichtprüfung vor dem Einsatz:

Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung auf sichtbare Schäden oder Defekte. Bei Auffälligkeiten das Gerät nicht verwenden.

16.4. Vorsicht bei der Anwendung von Licht:

Vermeiden Sie direkte Augeneinstrahlung durch das Lichtsystem. Tragen Sie bei Bedarf Schutzbrillen und geben Sie der Patienten einen Hinweis.

16.5. Verbotene Eingriffe:

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Wenden Sie sich bei Problemen an den Hersteller oder autorisierte Servicepartner.

17. Hinweise

17.1. Hinweis Licht:

ACHTUNG: Verwenden Sie das Lichtsystem nicht direkt auf den Augen des Patienten. Schützen Sie die Augen während der Anwendung.

17.2. Hinweis Luft:

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom vor der Anwendung reguliert wird, um eine angenehme Erfahrung für den Patienten zu gewährleisten. Zu starker Luftstrom kann Unbehagen verursachen.

17.3. Hinweis Regulierung – Stufen der Funktionen:

HINWEIS: Das Gerät bietet mehrere Stufen zur Regulierung von Lichtintensität und Luftstrom. Passen Sie die Stufen an die Bedürfnisse des Patienten und die spezifische Behandlung an.

17.4. Hinweis LED-Bereich:

ACHTUNG: Der LED-Bereich kann während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie den Bereich nicht während der Anwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.

17.5. Hinweis Öffnung für die Spiegel:

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Öffnung für die Spiegel vor der Anwendung sauber und frei von Verunreinigungen ist. Eine unsachgemäße Platzierung kann die Sicht und die Behandlungsqualität beeinträchtigen. (Abbildung 1 / Nr. 7)

17.6. Hinweis Batterie – Symbol:

ACHTUNG: Achten Sie auf das Batteriesymbol. Laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, um eine unterbrechungsfreie Nutzung zu gewährleisten. Verwenden Sie nur das empfohlene Ladegerät. (Abbildung 1 / Nr. 4)

17.7. USB-C-Stecker - Hinweis:

HINWEIS: Der USB-C-Stecker ist für die Stromversorgung und das Aufladen des Geräts zuständig. Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt eingesteckt ist, um Schäden zu vermeiden. (Abbildung 1 / Nr. 5)

18. Hinweis zur Inkompatibilität

18.1. Nicht kompatibel mit Kombinationen:

WICHTIG: Der zahnmedizinische Dentalfotospiegel darf nicht in Kombination mit anderen Produkten oder Zubehörteilen verwendet werden, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden. Die Verwendung von nicht kompatiblen Zubehörteilen kann zu Fehlfunktionen, Sicherheitsrisiken oder Beschädigungen des Geräts führen. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Komponenten aufeinander abgestimmt sind, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

19. Lagerung, Transport, Haltbarkeitsdauer

19.1. Sichere Lagerung:

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen Ort, um eine erneute Kontamination zu vermeiden.

19.2. Lagerbedingungen:

Lagern Sie das Clear Capture Gerät an einem trockenen, sauberen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Staub, um die elektronischen Komponenten und die Hygiene des Geräts zu schützen.

19.3. Verpackung:

Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung oder in einer geeigneten Schutzhülle auf, um Beschädigungen zu vermeiden.



20. Transport

20.1. Transportschutz:

Transportieren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung oder in einer gepolsterten Tragetasche, um es vor Stößen und Stürzen zu schützen.

Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile sicher verstaut sind, um ein Verrutschen während des Transports zu verhindern.

20.2. Temperatur und Feuchtigkeit:

Achten Sie darauf, das Gerät nicht extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen, da dies die Funktionalität beeinträchtigen kann.



20.3. Haltbarkeitsdauer/Batteriehaltbarkeit:

Die Haltbarkeit des Geräts hängt von der Nutzung und der Pflege ab. Achten Sie darauf, die Batterie regelmäßig aufzuladen und die empfohlenen Ladezyklen einzuhalten.

Lebensdauer der Komponenten:

Die Lebensdauer der elektronischen Komponenten kann je nach Nutzung variieren. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen sollte das Gerät überprüft und gegebenenfalls gewartet oder repariert werden.

Verfallsdatum:

Das Clear Capture Gerät hat kein spezifisches Verfallsdatum.

21. Technische Spezifikationen des Clear Capture Geräts

21.1. Technische Spezifikationen

Abmessungen:

Länge: 153 mm

Breite: 57 mm

Höhe: 33 mm

Gewicht: 115 g

Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur: 10 °C bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend

21.2. Elektrische Spezifikationen

Batterietyp:

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

Ladezeit: 4 Stunden für eine vollständige Aufladung

22. Warnhinweis



22.1. Achtung: Elektronisches Gerät!

SICHERHEITSHINWEIS: Dieses Gerät enthält elektronische Komponenten. Verwenden Sie es nur gemäß unseren Anweisungen. Vermeiden Sie Wasser- und Feuchtigkeitseinwirkung, um elektrische Schläge oder Geräteschäden zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor jeder Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird. Verwenden Sie nur das empfohlene Ladegerät und die entsprechenden Kabel, um das Gerät aufzuladen.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

22.2. Achtung: Flüssigkeiten vermeiden!

SICHERHEITSHINWEIS: Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um elektrische Schäden und Funktionsstörungen zu vermeiden. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in feuchten Umgebungen. Falls das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker oder schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie das Gerät überprüfen.



Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

22.3. Achtung: Medizinprodukt!

SICHERHEITSHINWEIS: Dieses Gerät ist ein Medizinprodukt und darf nur gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

Verwendung nur von geschultem Fachpersonal:

Nur geschulte Zahnärzte und zahnmedizinisches Fachpersonal sollten das Gerät bedienen.

Regelmäßige Wartung erforderlich: Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit.



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung für detaillierte Informationen.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

22.4. Achtung: Elektronische Geräte Entsorgung!

SICHERHEITSHINWEIS: Dieses Gerät enthält elektronische Komponenten. Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Umweltfreundliche Entsorgung: Bitte bringen Sie das Gerät zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum für Elektrogeräte oder schicken Sie es zu uns und wir kümmern uns um die Entsorgung.



RICHTLINIEN ZUR ENTSORGUNG: Beachten Sie die geltenden lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronik.

Vielen Dank, dass Sie zur Schonung der Umwelt beitragen!


23. CE-Konformität

Wir erklären, dass unsere Medizinprodukte sowie unser Zubehör für Medizinprodukte mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 konform sind. Daher sind alle Smile Line Europe Produkte mit der CE-Kennzeichnung versehen.



24. Technische Spezifikationen Der Bukkal- und Okklusalspiegel

24.1. Abbildung Abmessung Spiegel Okklusal

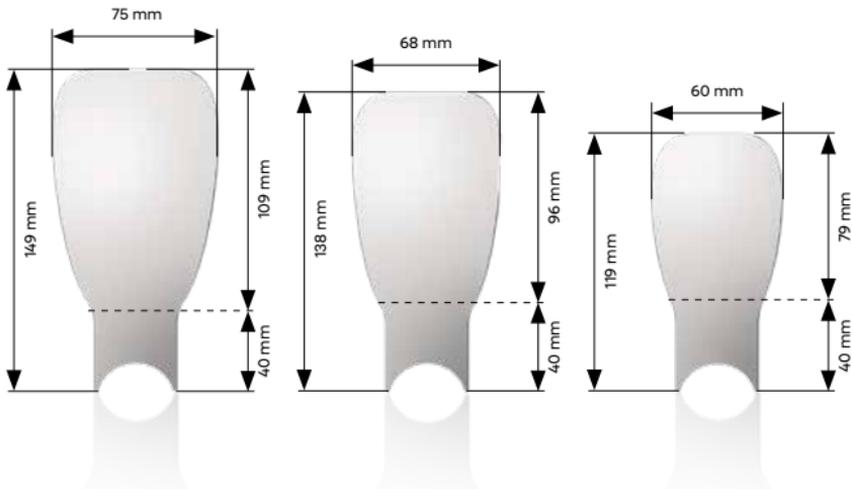

CC-Spiegel Okklusal

Groß

(Art.CCS-OKGD003)

Länge: 149 mm

Breite: 75 mm

Material: magnetische
beidseitig polierter
Edelstahl

CC-Spiegel Okklusal

Standard

(Art.CCS-OKSD002)

Länge: 138 mm

Breite: 68 mm

Material: magnetische
beidseitig polierter
Edelstahl

CC-Spiegel Okklusal

Klein


(Art.CCS-OKK001)

Länge: 119 mm

Breite: 60 mm

Material: magnetische
beidseitig polierter
Edelstahl

24.2. Abbildung Abmessung Spiegel Bukkal

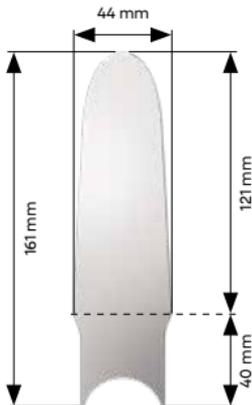

CC-Spiegel Bukkal


Lang

(Art.CCS-BL004)

Länge: 161 mm

Breite: 44 mm

Material: magnetische
beidseitig polierter
Edelstahl

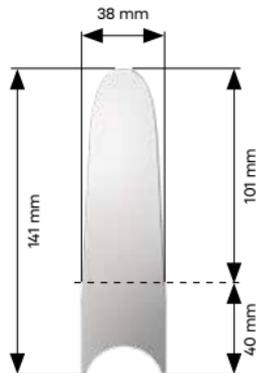

CC-Spiegel Bukkal

Kurz

(Art.CCS-BK005)

Länge: 141 mm

Breite: 38 mm

Material: magnetische
beidseitig polierter
Edelstahl

25. Bedienungshinweis

25.1. Okklusale Aufnahme



25.2. Bukkale Aufnahme





Smile Line Europe GmbH

Kirschanger 4 | DE-14548 Schwielowsee | y.reinicke@smileline-europe.com

Tel.0175 4651879 | www.shop-smileline-europe.com